


ポントドライ 3A/4A

染色工程の不要な水分・アルコールの除去

新発売

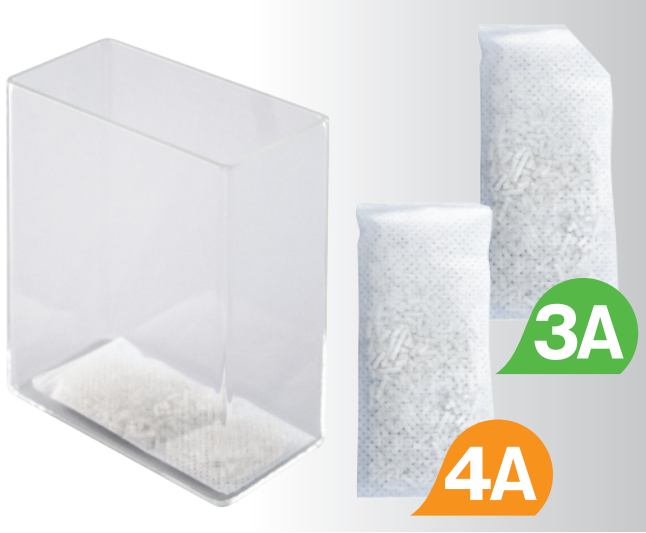

- 脱水もしくは透徹槽に沈めるだけ！
不要な水分・アルコールを吸着し、
染色トラブルを防止
- 3Aは脱水に、4Aは脱水・脱アル
コール対策に最適
- 袋詰め不要、回収も楽々
- 手染色、自動染色装置
「FAL Stainer」の試薬槽に※
- 退色防止に効果あり

用法 (3A/4A 共通)

- ・1槽につき、1個(5g)をご使用ください。1個につき、約1mLの水分を吸収します(目安)
- ・投入後、24時間放置してから染色にお使いください

自動染色装置 FAL Stainer

※手染色の他、弊社の自動染色装置「FAL Stainer」にも使用できます。



使用例

■ HE 染色処理プログラム例

工程	薬液名	処理時間
1	Clear Plus	20秒
2	Clear Plus	5分
3	Clear Plus	3分
4	Clear Plus	2分
5	無水エタノール	1分
6	無水エタノール	1分
7	無水エタノール	1分
8	90%エタノール	1分
9	70%エタノール	1分
10	流水	1分
11	Hematoxylin (ヘマトキシリン)	4分
12	流水	7分
13	流水	8分
14	Eosin (エオジン)	45秒
15	95%エタノール	20秒
16	無水エタノール	30秒
17	無水エタノール+ポントドライ3A	30秒
18	無水エタノール+ポントドライ3A	30秒
19	無水エタノール+ポントドライ3A	1分
20	Clear Plus+ポントドライ4A	2分
21	Clear Plus+ポントドライ4A	1分
22	Clear Plus+ポントドライ4A	1分
23	Clear Plus+ポントドライ4A	

封入装置 薬液槽: Clear Plus
封入剤: EXCEL mount 480

● ポントドライ4Aをご使用ください
● ポントドライ3Aをご使用ください



透徹槽の底に沈むように本製品をご投入ください。

スライドラックに干渉しない様、投入位置については十分ご確認ください。

商品コード	商品名	サイズ	包装単位
808-102-1	3A	85×40mm	1パック (25個入り)
808-102-2			4パック (1パック25個入り / 計100個)
808-100-1	4A		1パック (25個入り)
808-100-2			4パック (1パック25個入り / 計100個)

仕様は予告無く変更される場合があります。

発売元



株式会社 ファルマ

東京営業所
〒151-0065 東京都渋谷区大山町36-7
TEL 03(6407)2570 FAX 03(3465)0300
大阪営業所
〒532-0003 大阪市淀川区宮原5-1-3
TEL 06(6397)2411 FAX 06(6397)2852
<http://www.falma.co.jp>